

mobiCAREカート (MCC-01)

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は、mobiCAREカートを安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

安全上のご注意

品質に十分配慮して製造していますが、誤った使い方をすると周辺の器具に損害を与えたり、けがをする可能性があります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

安全上のご注意の 注意事項を守る

「安全上のご注意」の注意事項を必ずお読みください。

定期的に点検する

ご使用前に、カート本体・イスに、ゆがみ・ゆりみ・破損や亀裂等がないことを確認してください。点検は1年に1度行ってください。

故障したら使用しない

動作がおかしくなったり製品の破損に気がいたら、すぐに使用を中止して販売店に修理をご依頼ください。

警告

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う恐れがあります。

火気禁止

熱器具のそばに設置しない



本製品にはプラスチック素材を使用しています。ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所に設置すると製品が熱を帯びたり変形・変色の可能性があります。

分解禁止

分解・改造しない



分解・改造すると製品がスムーズに作動しなくなる可能性があります。

禁止

引いて移動しない



製品を引いて移動すると、製品の角に足をぶつけたり車輪で足を踏むなどしてけがをする可能性があります。必ず押して移動してください。また、乱暴に移動するとトレイに載せた機器などが落下して破損する可能性があります。

禁止

本体の上に乗らない



本体の上に乗るなどして体重をかけると、本体が破損したり、転倒して周辺の器具に損害を与えたり、人がけがをする可能性があります。

注意

イスに正しく座る



イスの後脚に移動用のキャスターが付いているため、上に立ったり逆向きに座ったりするなどの行為でイスが動きます。座る時は、できるだけ真上から座り、キャスターが動かないように注意してください。

⚠ 注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。

禁止 不安定な場所で使用しない



凸凹した不安定な場所や傾斜した場所で使用すると、製品が転倒したり不用意に移動して周辺の器具に損害を与える可能性があります。


禁止



天板の上に重いもの（10kg 以上）を載せない

本製品の天板には 10kg 以上の重量物を載せないでください。移動時やイスとのセッティングの際にバランスを崩してカートが転倒してしまう可能性があります。

各部の名称

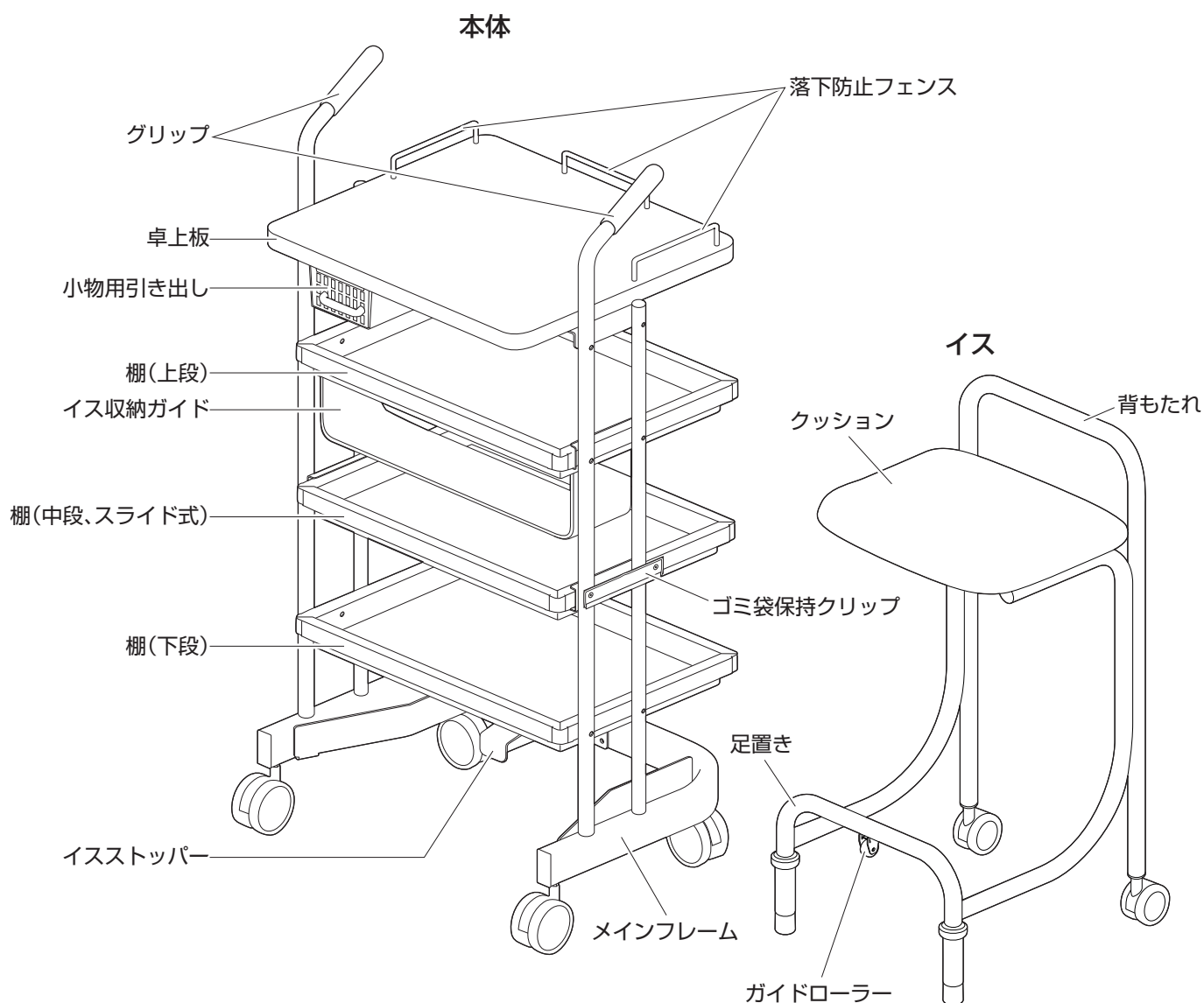

本体にイスをセットする


本体にイスをセットして一緒に移動することができます。セットされた状態でイスの背もたれを引いてイスを引き出すとセットが解除されます。

1. 棚(引き出し)を閉じます。


- ・棚(引き出し)が開いているとイスがセットできません。

2. 本体をイスに寄せていきセットします。


- ・イスのクッションが本体のイス収納ガイドに収まります。

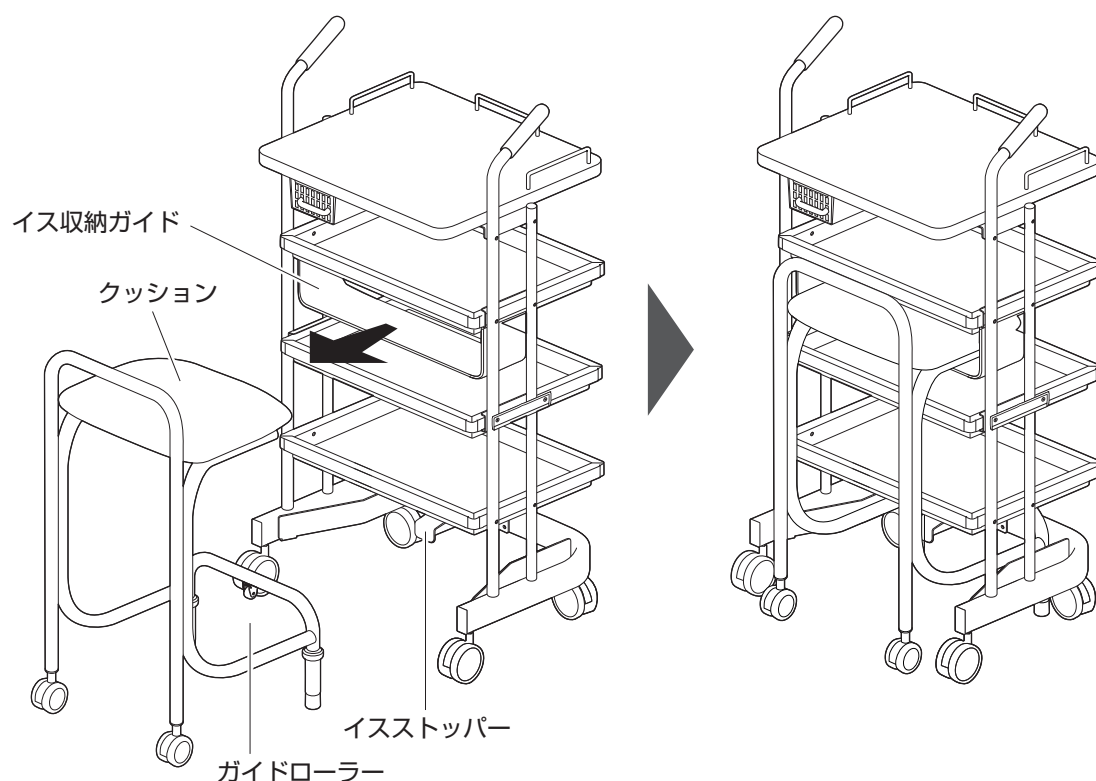

- ・本体とイスが正常にセットされるとイスのガイドローラーが、本体のイスストッパーの段差に収まります。

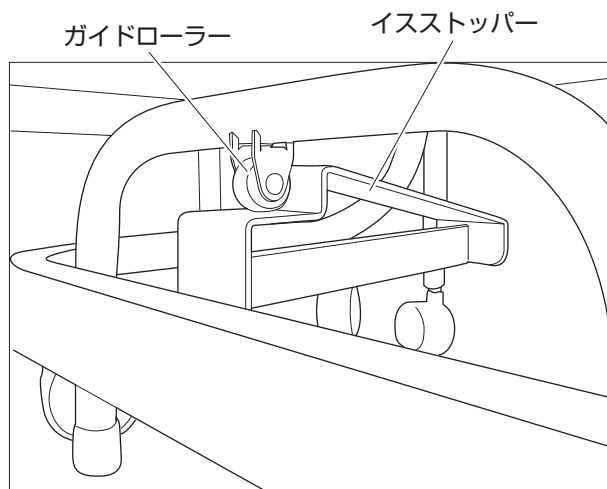

基本仕様

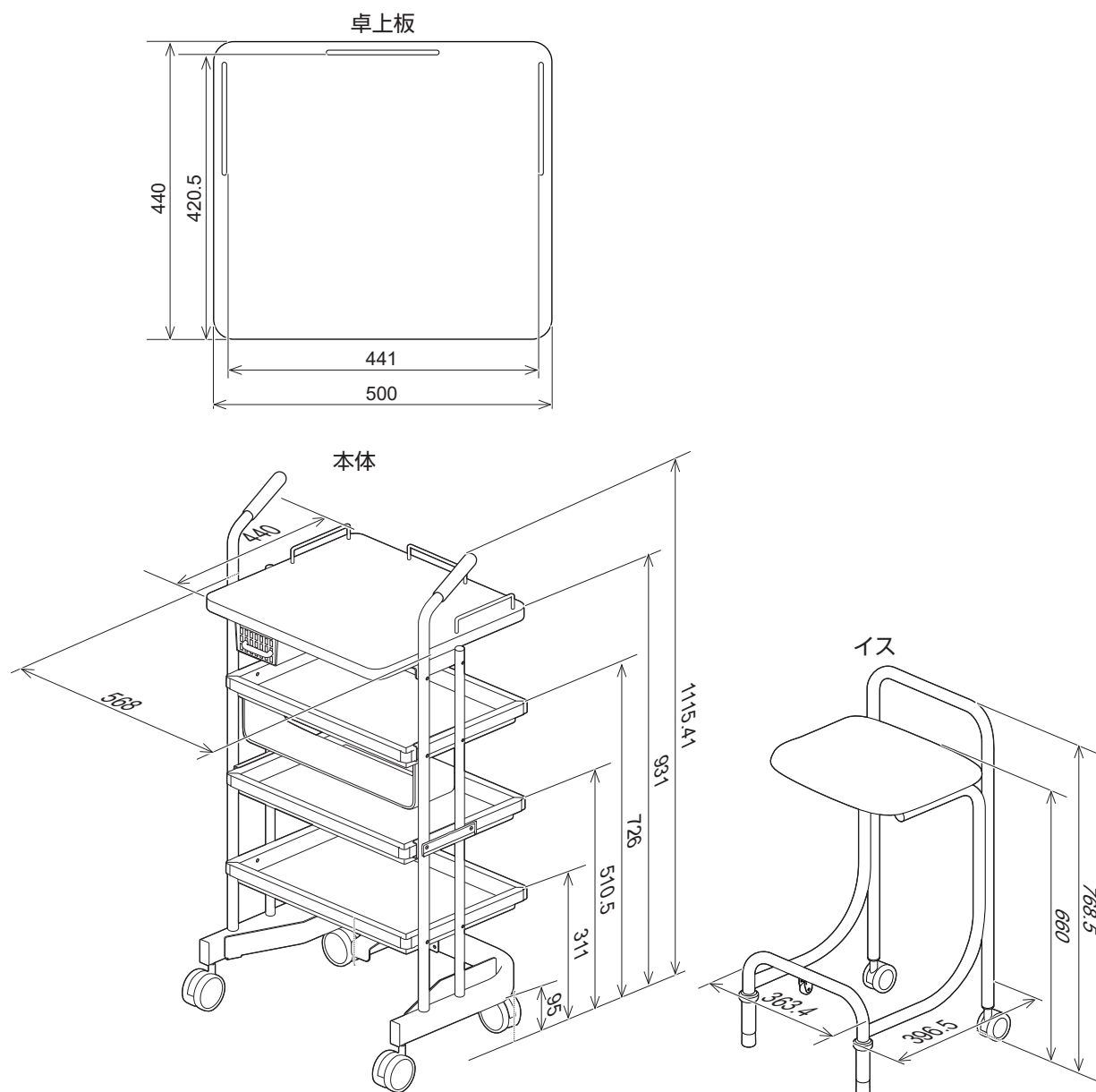

型番	MCC-01
本体サイズ(mm)	W568×H1,115.41×D440
イスサイズ(mm)	W363.4×H768.5×D396.5
本体重量(kg)	18.3
イス重量(kg)	4.7
本体卓上板耐荷重(kg)	10
イス耐荷重(kg)	100

販売元・問い合わせ先

泉株式会社 東京樹脂部 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 JR東急目黒ビル 15F TEL : (03) 5719-7482