

車イス常設タイプ車イス連結金具ユニット TS-RW

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。
また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

この車イス連結金具ユニットを既存の点滴スタンドと車イスに取り付けて、「後方連結型点滴スタンド」としてお使いいただけます。

安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると周辺の器具に損害を与えたりケガをする可能性があります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

安全上のご注意の 注意事項を守る

「安全上のご注意」の注意事項を必ずお読みください。

定期的に点検する

ご使用前に車イス連結金具ユニットのグリップ部、ノブ、ヒンジにゆがみ・ゆらみ・破損や亀裂等がないことを確認してください。点検は1年に1度行ってください。

故障したら使用しない

動作がおかしくなったり製品の破損に気がいたら、すぐに使用を中止して販売店に修理をご依頼ください。

警告

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う恐れがあります。

火気禁止

熱器具のそばに設置しない



製品にはプラスチック素材を使用しています。ストーブやヒーターなど発熱器具に近い場所に設置すると火災の原因になります。

分解禁止

分解・改造しない



正常に作動しなくなるだけでなく、部品が飛び出し大けがの原因になります。

禁止

異常を感じたら使用を中止する



異音や動作の異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると車イスや点滴スタンドから外れ大きな事故の原因となります。

注意

きちんと取り付ける



取り付け前に、取り付ける車イス、点滴スタンドの状態を確認し、しっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けられていないと車イスや点滴スタンドから外れ大きな事故の原因となります。

注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。

注意

車イスと連結するとき



車イス連結時は、パイプグリップ (R) (L) 2 か所を必ず連結してください。

注意

点滴スタンドと連結するとき



点滴スタンド連結時はゆらみなくノブをしめてください。

⚠ 注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。

注意 指はさみ注意



本製品を操作する際は、指をはさまないようご注意ください。

注意 自走しない



移動時は必ず介助者が操作してください。

注意 大きな段差は乗り越えない



車イスのキックバーを利用するような大きな段差の乗り越えは避けてください。
無理に乗り越えようとすると、スタンドが転倒して大ケガをする可能性があります。

注意 子供がさわらないようにする



小さなお子様が車イス連結金具ユニットを操作したり、車イス連結金具ユニットを使って遊ばないように注意してください。

使用上のご注意


本製品はほとんどの標準タイプ車イスと連結できます。ただし、以下の仕様・サイズの子車イスには取り付けできない可能性があります。また、点滴スタンドのベースサイズ・形状によっては取り付けできない場合があります。必ず取り付けできることを確認してからご使用ください。

取り付けできない車イス

- ・ 個人向けにカスタマイズされた車イス
- ・ リクライニング仕様の車イス
- ・ 電動車イス
- ・ シート巾が 380mm 以下または 420mm 以上の車イス

各部の名称

開梱時に必ず内容をご確認ください。

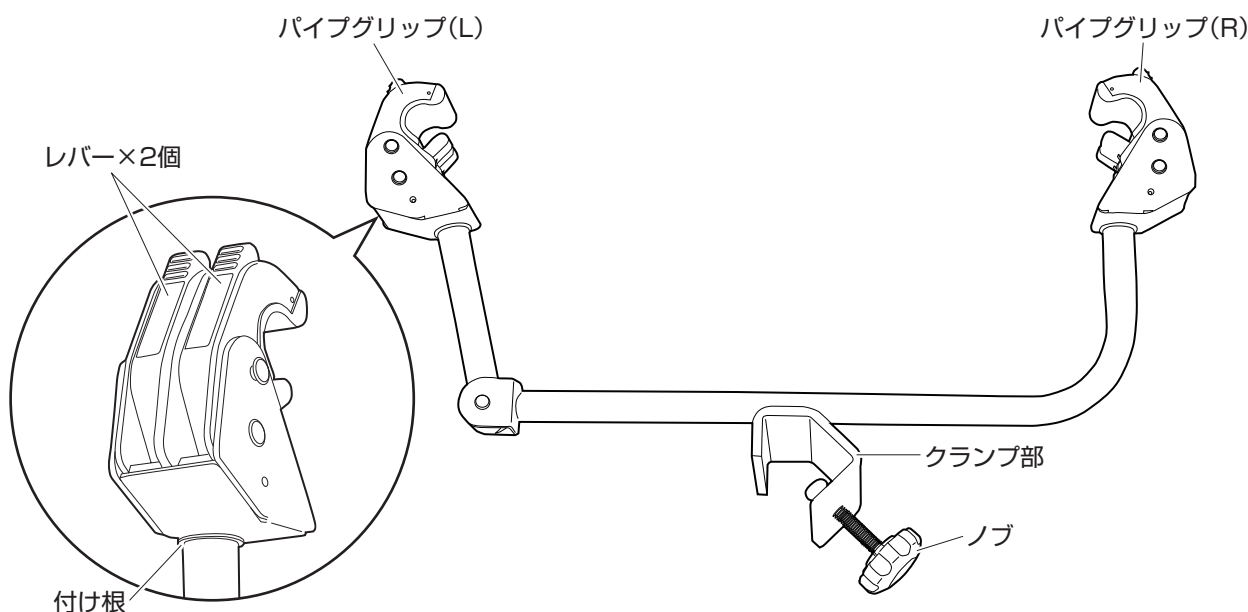


連結金具を取り付ける

1. 車いすに連結する。


1. 連結金具のパイプグリップ(L)を車イスの背もたれ左側パイプにはめ、レバー×2個を倒して固定します。

- 固定する位置は下向きになったパイプグリップ(R)が地面に着かない高さに調整してください。

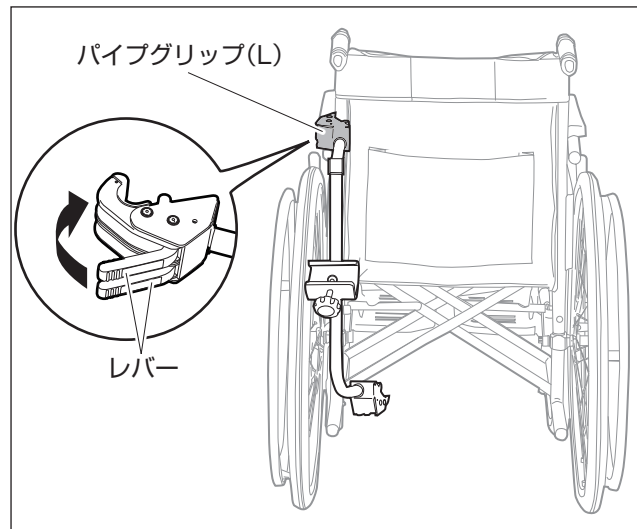

2. 連結金具のパイプグリップ(R)を車イスの背もたれ右側パイプにはめ、レバー×2個を倒して固定します。


- パイプグリップ(L)の付け根が回転します。パイプグリップ(L) (R)が平行になるように固定してください。
- 連結金具のヒンジで角度を調整しながら、きちんと固定できる位置を決定してください。

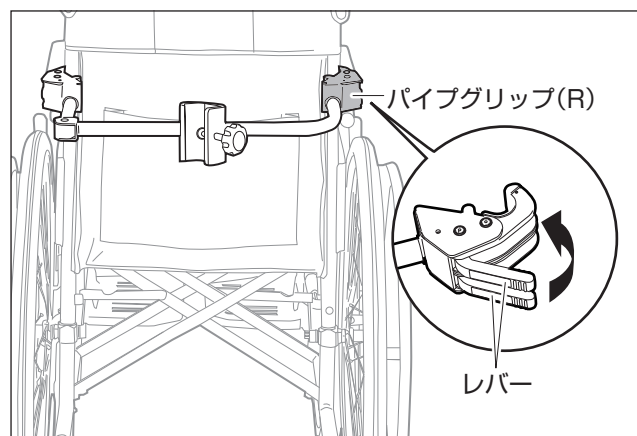

2. 点滴スタンドに連結する

1. 連結金具のクランプ部を点滴スタンドのポールにはめこみ、ノブを締めて固定します。

2. 車イスを動かしてきちんと連結されていることを確認します。

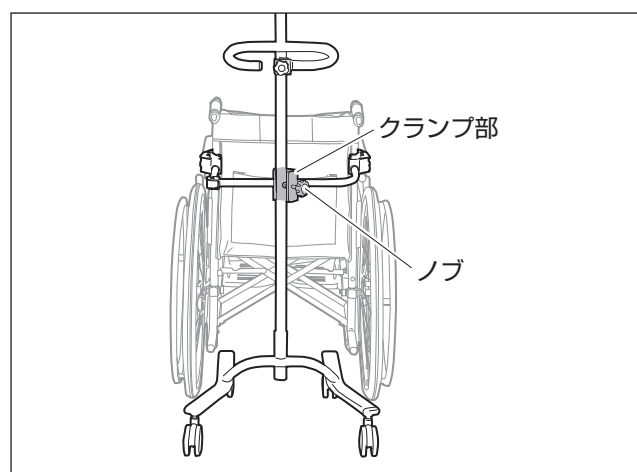

使用方法


⚠ 注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。

- 安全上のご注意を尊重の上、安全に十分配慮してご使用ください。
- 安全性を保つため、各部のネジにゆるみや外れがないかを適時点検してご使用ください。

1. 点滴スタンド連結時

1. 連結金具のクランプ部を点滴スタンドのポールにはめこみ、ノブを締めて固定します。

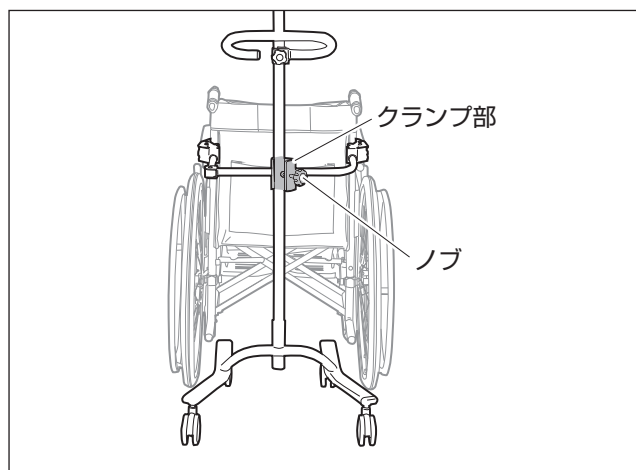

2. 点滴スタンド解除時

1. 連結金具のクランプ部のノブをゆるめ、点滴スタンドをはずしてください。

3. 車イス折り畳み時 ※予め点滴スタンドを外してください。

1. 連結金具のパイプグリップ(R)のレバー×2個を起こし、車イスの背もたれ右側パイプから外します。
 2. 外したパイプグリップ(R)が下向きになるように連結金具のパイプグリップ(L)の付け根を回転させます。
- 車イスの折り畳み方法については車イスの取扱説明書をご確認ください。

